

Dispomedic FFP2

Mascarilla de protección respiratoria.



CARACTERÍSTICAS

Mascarilla de protección respiratoria suave y cómoda.

Tipo FFP2 NR, no estéril.

Presenta tira de ajuste nasal de material moldeable adaptable y resistente


Clip para la sujeción de gomas

Envasada individualmente en caja dispensadora.


Libre de látex

Cumplimiento de la norma UNE-EN 149:2001+A1:2009


MODO DE EMPLEO

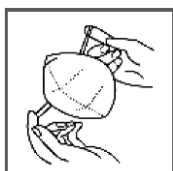

1. Sostenga la mascarilla firmemente.

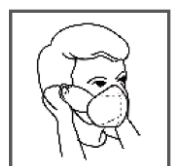

2. Colóquela debajo de la barbilla y presione la mascarilla libremente contra su cara con la pinza nasal en el medio de la nariz.

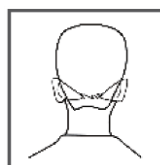

3. Tire de las gomas detrás de las orejas y sujete las dos gomas con el clip detrás de la cabeza.



4. Con ambas manos, moldee la pinza nasal a la forma de la nariz.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de una persona puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 3 años.
 No sacar la mascarilla de su envase hasta que sea necesario para su uso.

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
9000200	1500 unidades 50 uds/caja dispensadora 30 cajas dispensadoras/ caja	Caja dispensadora 14.5x12.5x22 Caja 65x45.5x35.5	20

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual.
- UNE-EN 149:2001+A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

